Erste Hilfe - Notfallmedizin



W. Söhngen GmbH - Postfach 1554 - DE-65223 Taunusstein

Taunusstein, August 2011

oculay NIT®

Produkt-Information

- 1. Bezeichnung des Medizinproduktes oculav NIT®
- Zusammensetzung des Medizinproduktes 100 ml der wässrigen Lösung enthalten: Natriumdihydrogenphosphat 2 H₂O Natriummonohydrogenphosphat 12 H₂O gelöst in Wasser für Injektionszwecke pH-Wert 7,4 (7,3 bis 7,4) Steril (aseptische Abfüllung)

440 mg 4040 mg

- 2.1. Stoff und Indikationsgruppe Isotone gepufferte Spüllösung (Phosphatpuffer) für Augen und Oberhaut
- 2.2. Wirksame Bestandteile keine
- 2.3. Sonstige Bestandteile Wasser für Injektionszwecke
- Anwendungsgebiete
 Zur Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie der Oberhaut nach chemischen Verätzungen, insbesondere durch Säuren, Laugen, Ätzalkalien usw.
- 4. Vorsichtsmaßnahmen Ungelöschter Kalk (Branntkalk) muss vor dem Spülen mechanisch bzw. durch Spülen mit größeren Mengen sterilem Wasser entfernt werden. Bei Verätzungen duch ungelöschten Kalk (Erdalkalien) **sofort** den Arzt konsultieren.

-1-

Erste Hilfe - Notfallmedizin



W. Söhngen GmbH - Postfach 1554 - DE-65223 Taunusstein

oculay NIT®

- 5. Warnhinweise
 - für Kinder unzugänglich aufbewahren
 - keine Anwendung nach Ablauf Verfalldatum
 - keine Wiederverwendung von Anbruchresten
- 6. Dosierung mit Einzel- und Tagesangaben Die Spülung sollte möglichst schnell innerhalb von Minuten nach Einwirkung der Noxe erfolgen und muss solange fortgesetzt werden, bis der schädigende Stoff ausgespült ist. Durch Druck auf die Spülflasche kann die Stärke des Strahles geregelt werden. Bei Spülung des Auges muss dieses mit der zweiten Hand oder durch einen Helfer offen gehalten werden.
- Art und Dauer der Anwendung
 Ausspülen des Auges bis zur Entfernung des schädigenden Stoffes. Eventuell Nachspülen mit Sterilwasser.
- 8. Dauer der Haltbarkeit 3 Jahre
- 9. Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise keine erforderlich
- Darreichungsform und Packungsgrößen
 Lösung zur Spülung 250 ml mit Originalitätsverschluss und Spülöffnung
- 11. Zertifikat / Status Medizinprodukt der Klasse II a, steril, CE 0482
- 12. Stand der Information Februar 2008
- 13. Vertrieb durch: W. Söhngen GmbH

Finanzamt Wiesbaden 40 248 37523 USt.-Ident-Nr.: DE 113 889 261 WEEE-Reg.-Nr.: DE 33612735

Geschäftsführer: Sabine Wüst Sitz der Gesellschaft D-65232 Taunusstein

HRB 16008, Amtsgericht Wiesbaden