



PRODUKTSPEZIFIKATION

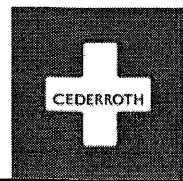

Produkt: SALVEQUICK SENSITIVE WUNDSCHNELLVERBAND
(PFLASTER) (AUS VLIES)

Referenznummer: 6943

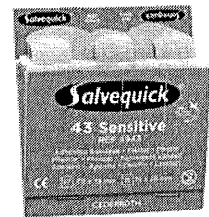

1. Allgemeine Beschreibung

Wundschnellverband in zwei Größen, mittelgroß und groß, in einer Refill-Pappverpackung.
Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverband.

Der Wundschnellverband besteht aus einer elastischen Außenschicht aus Vlies mit einer ebenmäßigen Klebebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes Kissen befestigt. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt ein Teil der abziehbaren Kunststoffolie darin zurück. Eine Hälfte des Verbands kann nun mit nur einer Hand auf die Haut appliziert werden. Nach Entfernung des anderen Teils der abziehbaren Folie kann der Wundschnellverband vollständig angebracht werden.

Das Produkt eignet sich aufgrund seiner geringeren Hauthaftung für empfindliche Haut und ist außerdem wasserabweisend.


2. Verwendungszweck

Der Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von Exsudaten aus kleineren Wunden.


3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

Mittelgroß	Wundschnellverband:	72x19 mm
	Wundkissen:	24x19 mm
Groß	Wundschnellverband:	72x25 mm
	Wundkissen:	72x25 mm
		mm

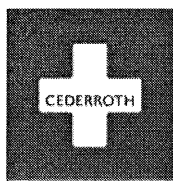

PRODUKTSPEZIFIKATION

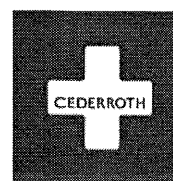

Material

Außenschicht	Elastische, weiße Außensicht aus Polyurethan-Vlies
Klebeschicht	Transparentes Polyacrylat
Wundkissen	Trockenes Nadelvlies (Viskose/PP) mit einer nichthaftenden PE-Wundkontaktschicht
Aufzulegende Schicht	Einseitig silikonisiertes abziehbares Papier/Folie
Verpackung	Kaltsiegel-Verpackung ohne Aufdruck

4. Zusammensetzung

Refill

<u>Ref #</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>M.</u>
45161031	Mittelgroßer Vlies-Wundschnellverband	27
45161032	Großer Vlies-Wundschnellverband	16
Abmessungen (L x B x H) mm:		30 x 87 x 100

Konsumentenverpackung

Anzahl Refills in der Konsumentenverpackung:	6
Abmessungen (L x B x H) mm:	100 x 150 x 90

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	10
Abmessungen (L x B x H) mm:	520 x 160 x 190
Gewicht (kg):	2,3

5. Kennzeichnung

Produkt (Refill)

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Symbole: CE, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer,
Webadresse
Produktname, Referenznummer,
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code,
Menge

Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer,
Web- und E-Mail-Adresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge
Symbole: CE, LOT, USE B

6. Lagerbedingungen


Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.
Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

7. Zubehör

Das folgende Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden:

Ref #: 490700, 1907

Salvequick Pflasterspender

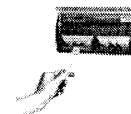

Genehmigt:

QA&RA Mgr

Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care
Cederroth AB, ou, E-
Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE Grund:
Ich genehmige dieses Dokument Datum:
22.5.2012 16:39:45 +02'00'