



DESIFOR- PLEXIFEE

Flächendesinfektion • begrenzt viruzid PLUS

Einsatzbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich. Einsetzbar auch auf Acrylglas.

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE wischen bzw. flächendeckend benetzen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	konz. 5 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 Niedrige Belastung
Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	konz. 5 Min.	VAH, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 16615 Niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Min.	EN 14348 Hohe Belastung
Mykobakterizid (M. avium + M. terrae)	konz. 30 Min.	EN 14348 Hohe Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 1 Min.	EN 14476 Niedrige Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 60 Min.	EN 16777 Hohe Belastung
Begrenzt viruzid PLUS	konz. 60 Min.	EN 14476 Niedrige Belastung

Technische Informationen

Karton mit 20 Fl. à 500 ml
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 20593
Art.-Nr. 20594

Wirkstoffe

100 g enthalten 0,113 g 2-Phenoxyethanol;
0,125 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chlorid;
0,113 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008
(CLP): keine

BAuA Reg.-Nr. N-86838

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0122

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren)
- DEKRA-zertifizierte Materialverträglichkeit für Acrylglas
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

Hinweise

Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc

0	2	4	6	8	10	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE